



VARILITE™

Pro-Form™

Das Kissen der Wahl für RollstuhlbenutzerInnen mit einem hohen Dekubitusrisiko. Für RollstuhlfahrerInnen welche eine anspruchsvolle, asymmetrische Sitzpositionierungshilfe benötigen.

SITZSYSTEM

Spezialisten empfehlen das Pro-Form Kissen für Personen mit individuellem Anpassungsbedarf wie z. Bsp. unterschiedliche Beinlängen, Beckenschiefstand oder Amputationen.

Die einfache Anpassbarkeit, die Modifizierbarkeit und die unkomplizierte Pflege (kein Verlust von Einzelteilen) werden beim Pro Form speziell geschätzt.



**E0192
Approved!**

Pro-Form Kissen Dual

	30 x 36 cm	36 x 36 cm	36 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 45 cm
Mit Standard Bezug	72412	74412	74612	76612	76812
Mit Inkontinenz Bezug	72422	74422	74622	76622	76822
	40 x 50 cm	45 x 40 cm	45 x 45 cm	45 x 50 cm	50 x 50 cm
Mit Standard Bezug	76012	78612	78812	78012	70012
Mit Inkontinenz Bezug	76022	78622	78822	78022	70022



Eine modifizierbare Schale, die gleichmässige Druckverteilung, die Auswahl auch einer assymmetrischen Positionierung, super Komfort und Einfachheit machen das Pro-Form Kissen zur idealen Lösung bei individuellen Anpassungswünschen an ein Antidekubitus Sitzkissen.

1. Geformte Unterseite

Die geschlossenen Schaumstoffzellen sind wasserabweisend und resistent gegen Bakterien. Die Unterseite kann mit Schneidwerkzeug bearbeitet werden, um die Sitzfläche oder eine unterschiedliche Beinlängenunterstützung anzupassen. Hohe Adduktorenkeile und eine feste Innenkontur liefern eine maximale Vertiefung und Optimierung der Druckverteilung. Eine geformte Oberschenkelführung verbessert die Position der unteren Extremitäten. Zur Verbesserung der Sitzneigung kann jederzeit ein Varilite-Keil zugefügt werden.

2. Luft-Schaumstoff Zirkulation

Das Pro-Form Kissen besteht aus einem zweiteiligen Luft-Schaumstoff Aufbau unter dem Becken. Durch Entfernen eines Teiles kann das Kissen sehr einfach z. Bsp. bei einem Beckenschiefstand angepasst werden. Dank der Einstellbarkeit des Ventils kann auch hier die Luft dosiert und individuell aus dem Kissen entfernt werden.

3. VARILITE Diamonds

Die spezielle Diamantenaufgabe besteht aus einzel verschweissten Schaumstoff- und Luftkammern. Diese können einfach abgeschnitten werden, um Änderungen in der Schalenform abzupolstern.


4. Überzug

Das Pro Form Kissen ist mit einem Standard- oder einem Inkontinenzüberzug verfügbar. Eingearbeiteter Schaumstoff in den Überzug optimiert die Luftzirkulation und fördert die Druckverteilung. Die Unterseite ist gummiert, rutschfest und mit Klettbindern versehen. Der Überzug ist in der Maschine waschbar.

5. Schaumstoffkeil

Ein modifizierbarer Schaumstoffkeil ist bei jedem Pro-Form Kissen standard. Der 5 cm hohe Keil kann sehr einfach und individuell angepasst werden

Varilite Kissen haben eine Garantie von zwei Jahren. Der Überzug 1 Jahr.

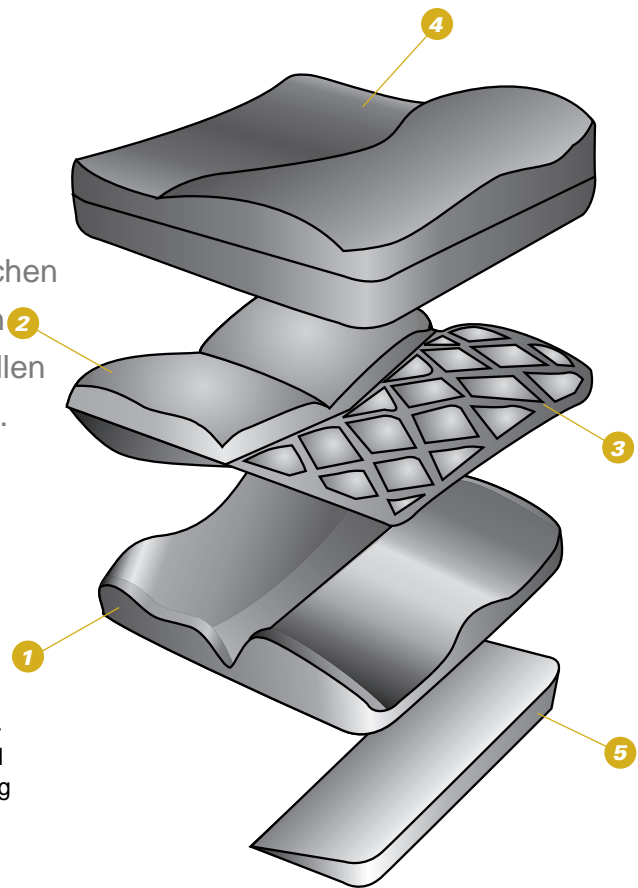

VARILITE™
A Division of Cascade Designs, Inc.

4000 1st Avenue South
Seattle, WA 98134
Phone: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.varilite.com

Authorized EU Representative:
Cascade Designs, Limited
Dwyer Road, Midleton, Co. Cork
Republic of Ireland

© 2003 Cascade Designs, Inc.

