



Stratus™

Das Kissen der Wahl für RollstuhlbenutzerInnen mit geringem Dekubitusrisiko. Für RollstuhlfahrerInnen, welche eine moderate Positionierungshilfe benötigen.

SITZSYSTEM

Spezialisten empfehlen das Stratus Kissen jenen BenutzerInnen welche ein leichtes Kissen brauchen. Dadurch wird der Energieaufwand, den man für die Fortbewegung braucht, verringert.

Benutzer schätzen das geringe Gewicht, das niedrige Profil und den Komfort.



Stratus™

	30 x 30	30 x 36	36 x 36	36 x 40	40 x 40	40 x 45
Mit Standard Bezug	52230	52430	54430	54630	56630	56830
Mit Inkontinenz Bezug	52240	52440	54440	54640	56640	56840
	43 x 43	45 x 40	45 x 45	50 x 45	50 x 50	
Mit Standard Bezug	57730	58630	58830	50830	50030	
Mit Inkontinenz Bezug	57740	58640	58840	50840	50040	

Positionsstabilität, Komfort, und Einfachheit haben das Stratus zum vielseitig begabten und effektiven Rollstuhlkissen gemacht.

1. Luft-Schaumstoff Zirkulation

Für die Funktion des Kissens werden zwei Arten von Schaumstoff angewendet; mittelweicher Schaumstoff für die Oberschenkelführung, gegen Beckenschiefstand und zur Beckenstabilisierung; harter Schaumstoff für die Sitzkontur und Adduktionsunterstützung.

Das Stratus Schaumstoff-Kissen ist luftdicht versiegelt, sodass Luft nicht ausweichen kann. Durch das Ventil kann der Benutzer Luft aus dem Sitzkissen ausströmen lassen. Dadurch tauchen die Sitzknochen in den Sitz ein, der Körper wird unterstützt und eine optimale Gewichts- und Druckverteilung wird gewährleistet.

Unabhängige Studien haben gezeigt, dass Feuchtigkeit verhindert und Erschütterungen optimal abgefangen werden.

2. Positionsunterstützung


Positionsunterstützung heisst, Sitzstabilität optimieren. Dies ist sehr wichtig für jeden Benutzer, der eine kompromisslose Sitzbalance haben möchte oder der oft transferiert. Die verschiedenen Schaumstoffdichten unterstützen zum einen die Sitzhaltung und lassen gleichzeitig die Sitzknochen in das Kissen eintauchen. Mit Hilfe der Adduktionkeile und des Abduktionskeils bleiben die Beine in der möglichst optimalen Haltung. Durch die Unterstützung im Beckenbereich wird eine aufrechte Körperhaltung gefördert.

3. Material

Der Stratus Schaumstoff ist mit einem Nylon Bezug zuge-schweisst, der für zusätzliche Stärke und Langlebigkeit sorgt.

4. Ventil zur Einstellung des Luftvolumens

Das Stratus verwendet das zweiwege Luftsystem. Auf dem mit Luft gefüllten Kissen sitzend, öffnet der Benutzer das Ventil. Luft strömt aus dem Kissen. Der Kunde schliesst das Ventil wenn die gewünschte Sitzposition erreicht ist.

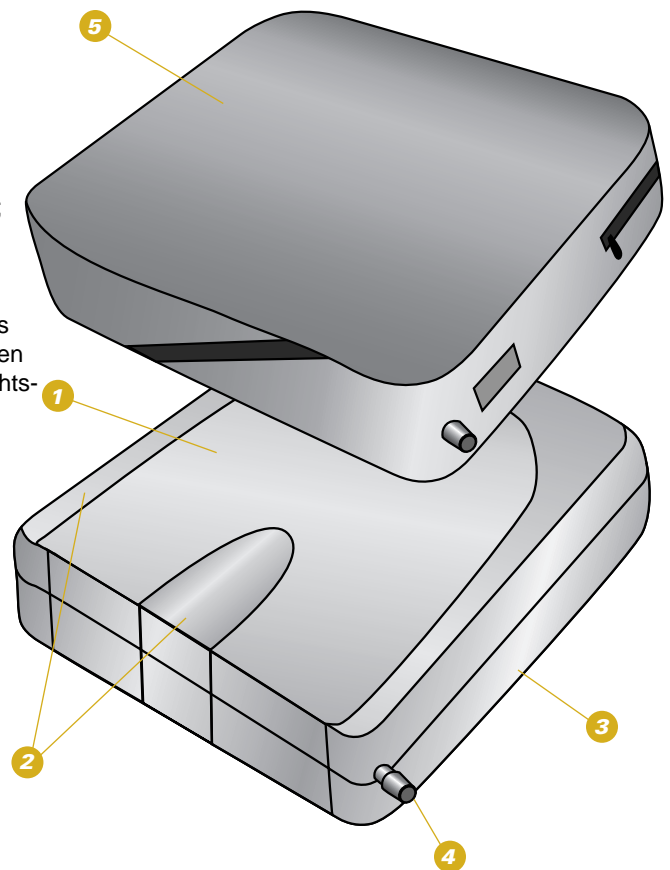

5. Überzug

Das Stratus Kissen ist mit einem Standardüberzug oder einem Inkontinenzüberzug verfügbar. Beide bestehen aus dem Spezial-Stretch Material. Eingenähter Schaumstoff fördert den Luftaus-tausch und verbessert die Druckverteilung. Die Unterseite des Sitzüberzuges ist gummiert, rutschfest und mit Klettbandern versehen. Der Überzug ist in der Maschine waschbar.